




VitalAire[™]
Leverandør af livskvalitet



Brugervejledning




www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret.
Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.


SimplyGo Mini-systemet

Apparatet leveres med følgende dele. Kontakt VitalAire hvis der mangler dele.



- SimplyGo Mini-apparat i transporttaske med skulderrem
- Standard eller udvidede genopladelige batterier
- Vekselstrømsforsyning og -ledning 110 - 240V
- Jævnstrømsforsyning 12V Bil
- Tilbehørstaske

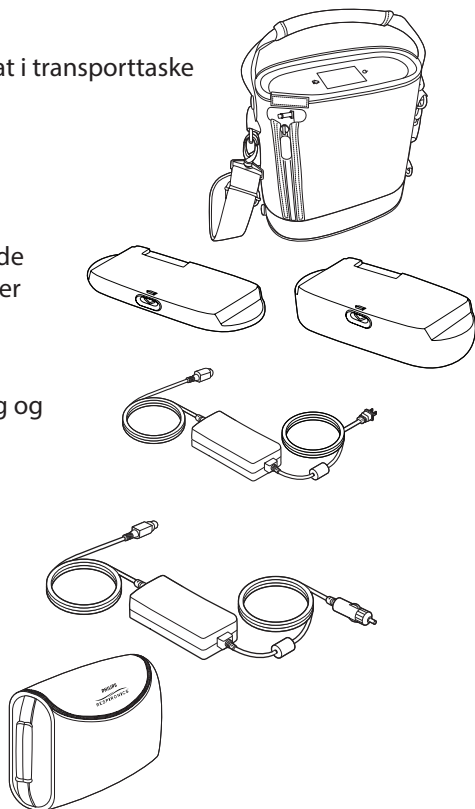

Kom godt i gang

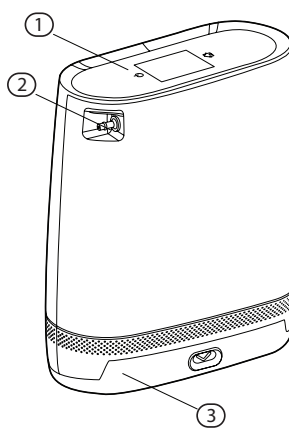

1. Kontrolpanel
2. Ilt udtag
3. Batteri
4. Strømsluk
5. Tænd/sluk
6. Display
7. Hjem knap

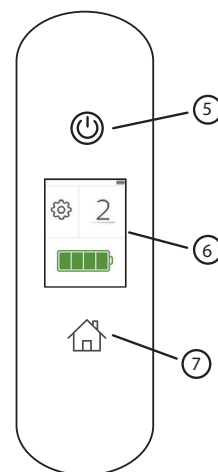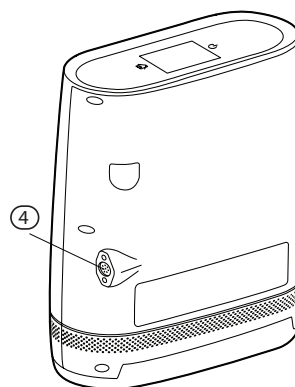

Sikkerhedsforskrifter



Tobaksrygning samt brug af åben ild er forbudt i nærheden af ilt-udstyr.

Følg altid lægens ordning af ilt. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Anvend aldrig olier, fedt og lignende på ilt-udstyret, ilt kan gå i kemisk forbindelse med fedtstofferne.

Forsøg aldrig selv at reparere ilt-udstyret.

Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter

Før anvendelse af ild skal du stoppe ilt-behandlingen i mindst 15 min. før iltten som har ophobet sig i dine klæder, ikke udgør nogen forhøjet brand risiko



Sådan tændes apparatet

1. Du kan trykke én gang på tænd/sluk-knappen eller simpelthen berøre det sorte skærbillede på apparatet for hurtigt at se indstillingerne

Skærbilledet, som er vist her, vil indeholde følgende oplysninger:

- O2-indstilling • Batterikapacitet

Skærbilledet slukker automatisk igen efter 5 sekunder

2. Hvis du ønsker at tænde helt for apparatet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen inden for 5 sekunder efter det første tryk

Når apparatet er tændt, vil det automatisk starte ved den ilt indstilling, der blev anvendt, sidste gang.




Ændring af O2-flowindstillingen

Udfør følgende trin for at ændre O2-flowindstillingen:

1. Berør O2-tallet, som vises på skærbilledet Hjem, for at få adgang til skærbilledet med O2-indstillinger. Vises nedenfor.

2. Tryk på knapperne + eller - for at hæve eller sænke ilt-indstillingen Du kan justere indstillingen fra 1 til 5

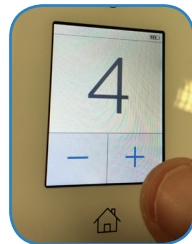

Kontrol af batteristatus

Batteristatus kontrolleres på følgende måde:

1. Berør batterisymbolet, som vises på skærbilledet Hjem, for at få adgang til skærbilledet med batterioplysninger. Vises nedenfor.



Batteriets procenttal vises på skærmen, for at angive hvor stor batterikapacitet der er tilbage.



Sådan slukkes apparatet

1. For at slukke for apparatet skal du trykke på tænd/sluk-knappen, og det viste bekræftelsesskærbillede vises

2. Tryk på tænd/sluk-knappen endnu en gang for at slukke apparatet.

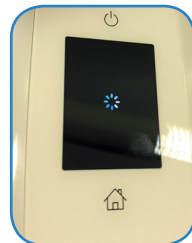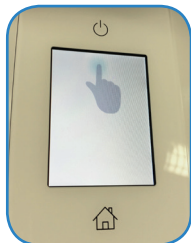


OBS Kontrolpanelet

Kontrolpanelet er en berøringsskærm. Der er ingen knapper, så der skal ikke trykkes hårdt på skærmen.







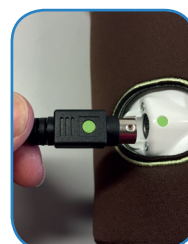


Opladning af batteriet

Bemærk: Batteriet vil begynde at oplade, når du slutter apparatet til en strømkilde, uanset om det er i brug eller ej.

1. Sæt stikket i maskinen som vist. De to grønne prikker overfor hinanden og stikket presses i forsigtig. Maksimal opladningstid er 4 timer for standardbatteriet og 8 timer for det udvidede batteri, fra helt opbrugt til helt opladt, afhængigt af strømkilde og anvendelse.



Følgende tabel beskriver hvert af batterisymbolerne:

Symbol:	Beskrivelse:
	Batteriniveau på 25 %
	Batteriniveau på 50 %
	Batteriniveau på 75 %
	Batteriniveau på 100 %
	Batteriet oplader eller batteriopladningen er færdig, og den eksterne strømkilde er stadig tilsluttet. Bemærk: De grønne blokke i batteribjælken vil rulle, mens batteriet oplader, og dette symbol vises. Når det er helt opladet, holder batteriblokkene op med at rulle, og der lyder ét langt bip.
	Lavt batteri – angiver, at batteriniveauet er næsten opbrugt
	Batteri opbrugt
	Strøm 110 - 240 tilsluttet, intet batteri sat i (grøn)
	Eksternt strømsvigt, intet batteri sat i (gul)



Specifikationer

Dimensioner: 23,9-25,9 x 21,1 x 9,1 cm

Vægt: 2,3 - 2,7 kg. efter bateri størelse

Lydniveau: <43 dBA i gennemsnit

lftprocent: Bolus 1-5 = >87-96%

Strøm: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Puls vol.

- | | |
|----------|--------------|
| 1. 11 ml | 220 ml/min. |
| 2. 22 ml | 440 ml/min. |
| 3. 33 ml | 660 ml/min. |
| 4. 44 ml | 880 ml/min. |
| 5. 50 ml | 1000 ml/min. |
- +/- 25% eller 6 ml (merer end 20 puls i min.)



VitalAire under AirLiquide Gruppen, er med sine 6.000 ansatte over hele verden, repræsenteret indenfor Homecare, medicinske gasser, medicinsk hygiejne samt indenfor farmaceutiske og kosmetiske hjælpestoffer.