



Brugervejledning

Ilt-koncentrator "VisionAire"

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret.
Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

Brugervejledning

Kend din ilt-koncentrator



Service

■ Har du akut nedbrud af dit ilt-udstyr, eller er du i tvivl om betjeningen af dit ilt-udstyr, kan du kontakte VitalAire, hele døgnet.

■ Iltflasker, iltslanger og iltbriller bestilles efter behov hos VitalAire. Bestil venligst hverdage, mandag - torsdag kl. 8-16 fredag kl. 8-15.30 Du kan også bestille på www.vitalaire.dk

■ Ilt-udstyret tilhører VitalAire og skal returneres efter endt brug.

Telefon 44 92 35 44

Sikkerhedsforskrifter



Tobaksrygning samt brug af åben ild er forbudt i nærheden af ilt-udstyr.


Anvend aldrig olier, fedt og lignende på ilt-udstyret, ilt kan gå i kemisk forbindelse med fedtstofferne.

Forsøg aldrig selv at reparere ilt-udstyret.

Følg altid lægens ordning af ilt. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Du vil tænde for ilt-koncentratoren

Ilt-koncentratoren tages i brug således:

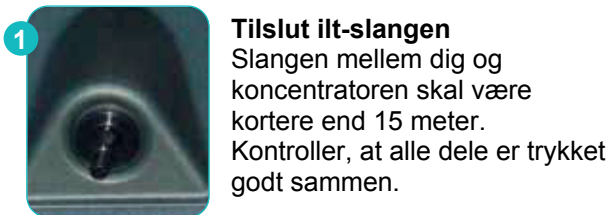

1

Tilslut ilt-slangen

Slangen mellem dig og koncentratoren skal være kortere end 15 meter. Kontroller, at alle dele er trykket godt sammen.



2

Tænd


Tilslut koncentratoren til en stikkontakt. Tryk på den sorte knap [1].



3

Alarm-test


Der udføres automatisk en alarmdriftstest, når maskinen starter (denne test varer ca. 5 sekunder).

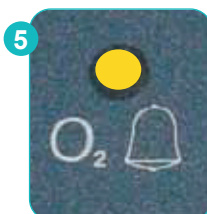

5

Alarm

Lysdioden forbliver tændt i nogle få minutter, (maksimalt 10 minutter).

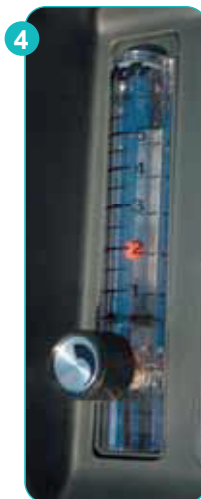

4

Indstilling af ilt-dosis

Drej flow justeringsknappen til midten af kuglen, er placeret ud for den ilt-dosis din læge har ordineret.

Kontroller, at der kommer ilt ud af iltbriller.

Bemærk: Optimal ilt kvalitet opnås ca. efter ti min. Ved slutningen af behandlingen sættes afbryderkontakten til stilling 0. Det iltmættede luftflow fortsætter i ca. 1 minut efter at apparatet er stoppet.

Hvis du har problemer

Inden du kontakter VitalAire, bør du undersøge følgende fejlmuligheder:



Koncentratoren tænder ikke

Kontrollér, om ledningen sidder i stikkontakten, og om der er tændt?



Koncentratoren giver ingen ilt

Kontrollér, om doseringskuglen står til din ilt-dosis. Kan du ikke justere ilt-dosis og kuglen forbliver i bund, så tag slangen af ilt-udtaget på koncentratoren. Kan du nu justere ilt-dosis, er det fordi der er en blokering på slangen. Ret fejlen og monter slangen igen.

Alarmer

Ingen spænding: Ved strømudfald udløses en pulsede lydalarm.

Driftsfejl: Ved en betjeningsfejl udløses en pulsede fleretonet lydalarm.

Brug og vedligeholdelse

- Ilt-koncentratoren må kun anvendes til ilt-behandling efter en læges anvisning, og kun i den ordinerede ilt-dosis og varighed. Misbrug kan udgøre en risiko for patientens helbred.
- Rengøring: Kun ydersiden af ilt-koncentratoren rengøres med en tør klud eller, om nødvendigt, med en fugtig klud og sulfvand. Aftør derefter apparatet grundigt.
- Ilt-koncentrator bliver serviceret hver tredje mdr. af en uddannet ilt-instruktør, for at sikre en høj hygiejne og ilt-kvalitet.



VitalAire A/S
Høje Taastrupvej 42, 2630 Taastrup

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Telefon 44 92 35 44

Tekniske data:

Dimensionerer: D x B x H: 29,2 x 35,8 x 52,8 cm
Vægt: 13,6 kg. Lydniveau: 40 dBA

Flow-værdier:
1 - 5 l/min.

Gennemsnitligt iltindhold:
90 % + 5,5% +/- 3 %.
(værdier ved 21 °C og et atmosfærisk tryk på 1013 mbar). Maks. flow: 5 l/min. Det maksimale udgangstryk er 55 kPa.

Elforsyning:

220 - 240 V - 50 Hz
Gennemsnitligt strømforbrug 290 watts

Miljømæssige grænseforhold:

Apparatets ydelse (specielt ilt-koncentrationen) er opgivet ved 21 °C og 1013 mbar. Denne kan ændres ved anden temperatur og i andre højder.

- Apparatet skal fortrinsvis opbevares og transporteres i lodret position.
- Apparatet må kun anvendes i lodret position.
- Omgivelsestemperaturer på mellem 5 °C og 35 °C.
- Apparatet må ikke stilles i fugtige rum

