



Sikkerhedsfolder

Sikker brug af ilt. Rejse med ilt & praktiske oplysninger

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Telefon 44 92 35 44

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du sikkert og trygt bruger ilt.
Er du stadig i tvivl om brugen af ilt, anbefales du at kontakte os.

Sikker brug af ilt

Ilt er en farveløs og lugtfri luftart, som hverken kan ses eller smages. Ilt er i sig selv ikke brændbar, men luftarten er stærkt brandnærende.

Når iltindholdet i luften stiger, øges brandrisikoen og det er derfor nødvendigt at kende de risici, som er forbundet med brugen af ilt.

For at du kan føle dig tryk ved at bruge din ilt, har vi beskrevet de ting du skal være opmærksom på.

Vær opmærksom på



Rygning forbudt



Rygning er IKKE TILLADT i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes. Ilt udgør en brandfare og røg ødelægger ilt-udstyret.

Sikkerhedsafstand

Hold min. 2 meters afstand fra dig selv og hen til åben ild som f.eks. cigaretter, lys, brændeovn o. lign.

Brug af åben ild



Før anvendelse af ild skal du stoppe ilt-behandlingen i mindst 15 min. for at ilten som har ophobet sig i dine tøj, ikke udgør nogen forhøjet brand risiko

Ilt-briller

Læg aldrig en ilt-brille fra dig uden at slukke for ilt-udstyret.

Når ilten ikke er i brug

Sluk for ilten når du ikke bruger den, for at undgå at berige sengetøj, tæpper o. lign. med ilt.

Følg lægens ordination

Ilt er en medicinsk behandling og som med al anden medicin, skal du følge lægens anvisning.

Brugervejledninger

Læs brugervejledningerne grundigt igennem, så du ved hvordan dit ilt-udstyr virker.

Værktøj



Brug aldrig værktøj på ilt-udstyret og forsøg aldrig selv at reparere det. Er der noget galt med udstyret, så ring til os.

Brug aldrig olie

Smør aldrig udstyret med olie, da olie og ilt sammen udgør en risiko.

Bærbart udstyr

Bærbart ilt-udstyr skal bæres i den taske, der er konstrueret og udleveret specielt til formålet.

Adgang til ilten

Opbevar ilt-udstyret forsvarligt og røgfrit. Uvedkommende personer må ikke have adgang til udstyret.

Ansigts- og håndcreme

Når du køber cremer til ansigt og hænder, så bed om produkter der er egnede til brug sammen med medicinsk ilt.

Tørre slimhinder

Spørg på apoteket efter produkter uden olie og fedt.

Ventilation

Sørg for god og røgfri ventilation hvor du bruger ilten og tildæk aldrig ilt-udstyret.

Spørgsmål

Er du i tvivl om brugen af ilt, så ring til din ilt-sygeplejerske / VitalAire.

Praktiske oplysninger

Ilt-bruger

Som ny iltbruger er det vigtigt du er tryk i sikker brug af udstyret. Derfor har vi planlagt et opfølgende besøg hvor du også får en grundig vejledning i sikker brug af udsyret. På bagsiden af denne folder har du oplysninger på:

- Tid og dato for opfølgende besøg
- Angivelse af den ordinerede ilt-dosering/ timer og om der anvendes fugter
- Leverandør
- Ilt-sygeplejerske
- Ansvarlig læge/hospitalsafdeling
- Eventuel Hjemmepleje

Patient bestillinger

Bestillinger kan ske på flere måder: til kontoret på telefon 44 92 35 44 alle hverdage mandag. – torsdag mellem 8:00 – 16:00 fredag mellem 8:00 – 15:30, hjemmeside vitalaire.dk døgnet rundt, bliver besvaret i kontorets åbningstid, e-mail kontakt@vitalaire.dk døgnet rundt, bliver besvaret i kontorets åbningstid.

Svigtende udstyr og tvivlsspørgsmål

Du kontakt kan VitalAire året rundt på 44 92 35 44, der vil altid være en ilt-instruktør på vagt, som kan afhjælpe akutte problemstillinger.

Service og kontrol af udstyr

Ilt udstyret bliver serviceret og kontrolleret mindst hver 3 måned. hvor iltslangen bliver skiftet


El refusion

På det stationære udstyr udbetales der refusion af regionen. ca. hver tredje måned

Levering af iltbriller

Der leveres iltbriller, så der er til at skifte mindst et sæt hver 14 dag. Der findes flere forskellige slags, som vist herunder. 1. buet 2. lige 3. buet tragformet 4. lige tragformet 5. med monteret ørebeskytter. 6. Ørebeskytterne fås også løse, så man kan montere dem, præcis på den iltbrille man foretrækker. For at undgå trykmærker og sårdannelser bag ørerne, findes iltbriller også i en del super bløde versioner.

Brug en ren fugtig klud en gang om dagen, til at tørre næsespidserne og hovedslangen af med. Ved fugter tilkoblet, skal udskiftning af iltbrille, kondenssamlere, samleled samt iltslange ske minimum hver 8. dag

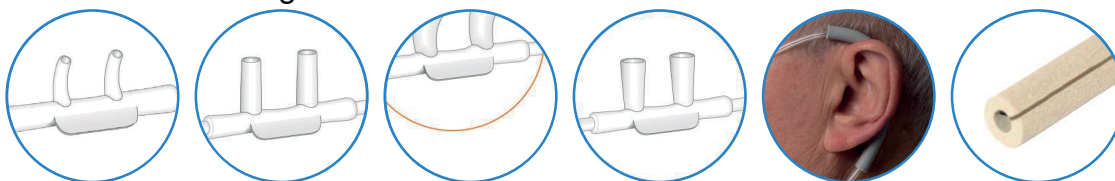

Ophold i Danmark og udlandet

Skønnes det mobile iltudstyr ikke hensigtsmæssigt og tilstrækkelig dækkende på rejsen for din ilt-behandling, sørger vi for levering i Danmark og i udlandet. Ved planlægning af rejse i udlandet er det første skridt, at vi forespørger om mulighederne for en professionel levering på destinationen. Bestil i god tid før rejsen.

Vi sørger for, at det relevante udstyr, har de godkendte dokumenter med til flytransport. Det er derfor vigtigt, at vi kender det enkelte flyselskab du skal med, for de er vidt forskellige på krav der skal opfyldes, før du som iltbruger bliver godkendt som passager. Nogle krav kan være, at man har fået foretaget en flytest hos egen læge. eller at man har ilt forsyning nok til 150%. af flytiden

Brugeroplysninger

Ilt-bruger:

Ilt-dosering: ____ l/min. Timer: ____

Ilt-dosering i aktivitet: ____ l/min.

• Leverandør

44 92 35 44

• Iltsygeplejerske

• Læge/hospitalsafd.

• Hjemmepleje

• Ilt-instruktør

AIRVO **Luft-flow** ____ **Ilt-flow** ____ **Ilt-** ____ %

FUGT _____

Kontrol af iltudstyr

Dato:	Ilt%	Flow	Filterskift	Timetæller	Navn
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					
/ 20					

Telefon **44 92 35 44**